


Visiera in PVC – Versione facciale

Per un corretto e sicuro montaggio **della visiera**, segui alcune semplici indicazioni.

Non è un dispositivo di protezione individuale né un presidio medico.


MONTAGGIO

1

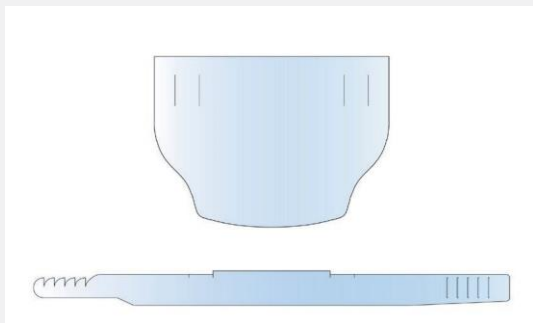


Visiera in PVC

2

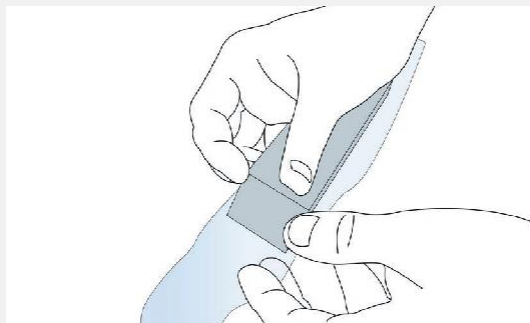


Applicare la fascia in gommapiuma sulla fascia avvolgibile.

3

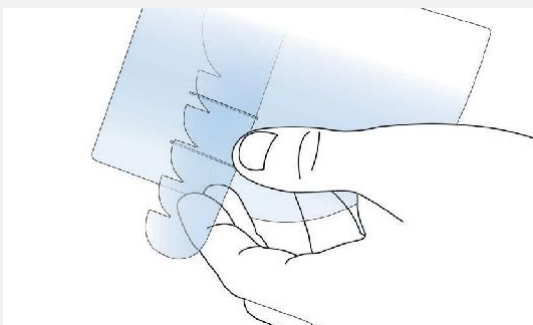


Fai passare la fascia attraverso la fessura più interna presente nella parte alta su entrambi i lati del visore.

4

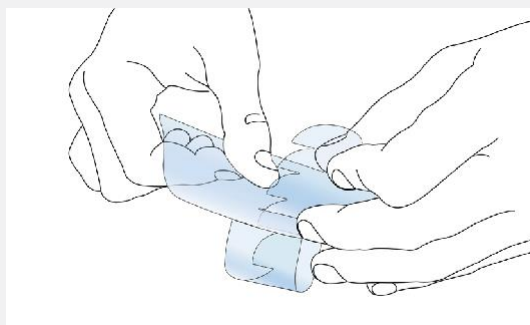


Subito dopo, inserisci la fascia attraverso la fessura più esterna e ripeti l'operazione anche sul lato opposto.

5

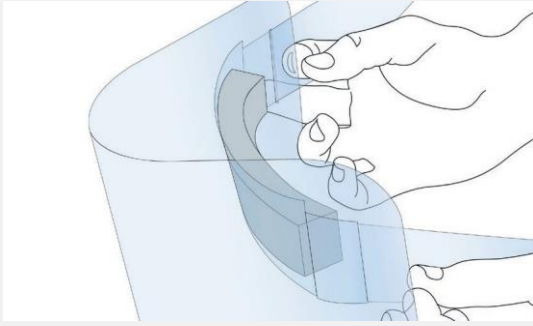


Estendi la fascia fino ad arrivare all'incastro di bloccaggio.

6

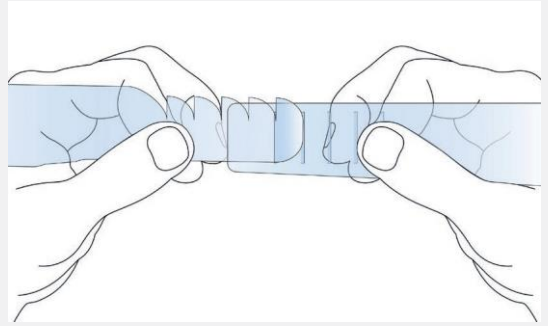

Indossa la visiera scegliendo l'incastro più adatto e sicuro.

7

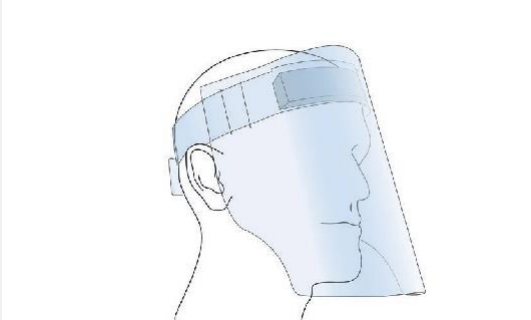

La visiera facciale è monouso.
Se riutilizzata, consigliamo di disinfettarla con una soluzione a base di alcool.


Visiera in PVC – Versione integrale

Per un corretto e sicuro montaggio **della visiera**, segui alcune semplici indicazioni.

Non è un dispositivo di protezione individuale né un presidio medico.

MONTAGGIO

1

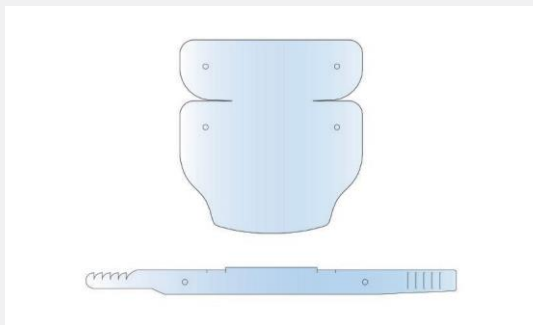

Visiera in PVC

2




Applicare la fascia in gommapiuma sulla fascia avvolgibile.

3




Inserisci l'elemento maschio del bottone automatico all'interno del foro della fascetta.

4

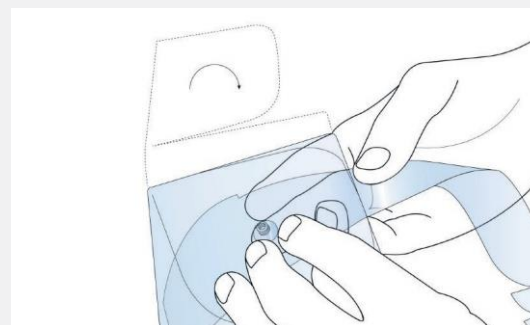


Incastra il maschio dentro agli altri due fori della visiera.

5

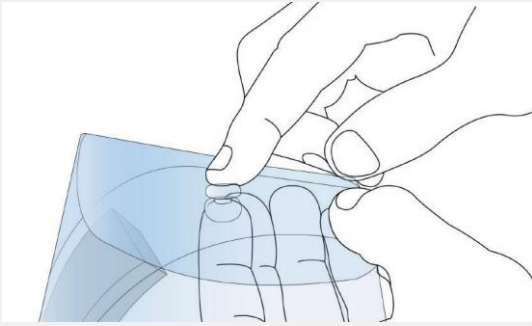


Sigilla i tre fori chiudendo il bottone con la parte femmina. Ripetere sul lato opposto.

6

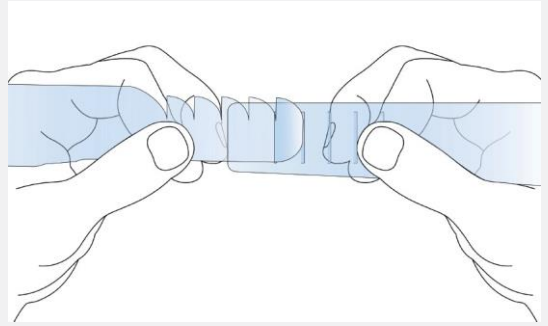

Indossa la visiera e chiudila posteriormente scegliendo l'incastro più adatto e sicuro.

7

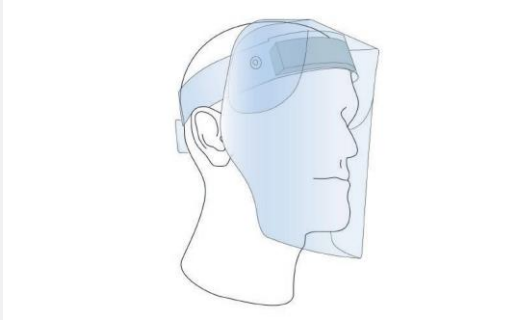

La visiera integrale è monouso.
Se riutilizzata, consigliamo di disinfettarla
con una soluzione a base di alcool.